

CUALQUIER DUDA:

gina.garcia@mindray.com

+57 3173641057

Al presionarlo activo el modo Doppler Pulsado (PW- Pulsed Wave), al rotarlo aumento o disminuyo la ganancia del PW

Al presionarlo activo el modo Color, al rotarlo aumento o disminuyo la ganancia del COLOR

Al presionarlo activo el modo Bidimensional, al rotarlo aumento o disminuyo la ganancia total del modo B

Al presionarlo activo el modo M, al rotarlo aumento o disminuyo la ganancia del modo M

Aparecen las referencias corporales


Al presionarlo obtengo una flecha, su tamaño puede ser cambiado a través de la pantalla LCD

Al presionarlo puedo añadir comentarios de la pantalla LCD solo presionando la palabra que deseo ó con el teclado

Al presionarlo activo el modo Doppler Continuo (CW- Continuos Wave), Modo de utilidad CARDIOLOGICA

Sirve para actualizar la imagen inmóvil al estar en PW

Al presionarlo activo el modo Doppler Power (Energía ó Poder), teniendo éste activo y rotando el botón de C aumento o disminuyo la ganancia del Doppler Power.

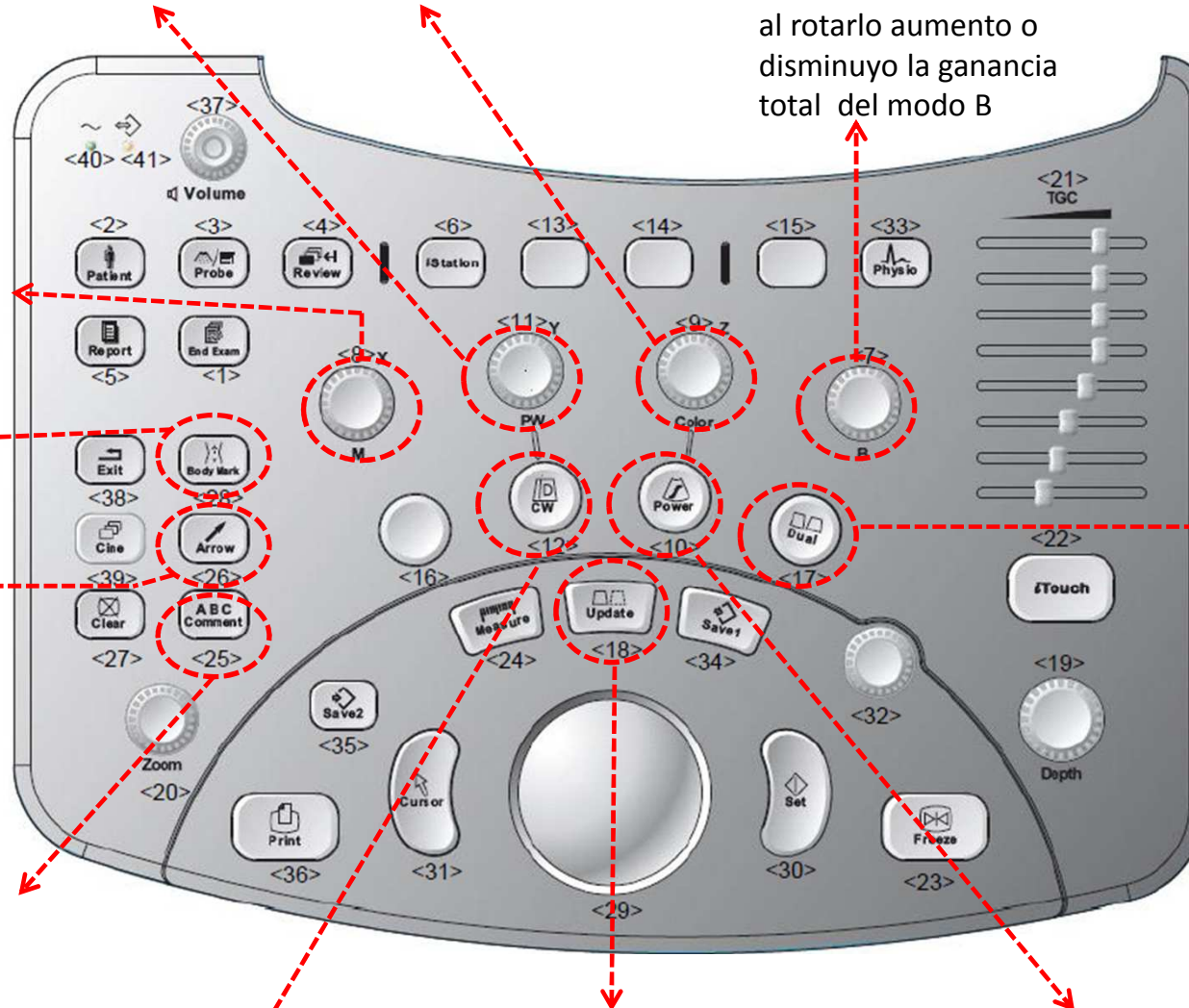

Al girarlo modifica el volumen en el PW

Abre pantalla para ingresar o cambiar datos del paciente

Abre el reporte del preset donde se este trabajando

Finaliza el examen actual y abre pantalla para ingresar datos del siguiente paciente

2 tipos de zoom. Al rotarlo tengo zoom normal, al presionar y rotar tengo zoom de alta resolución(usar mejor el segundo)

Almaceno videos

Al presionarlo imprimo

Al girarlo modifica el volumen en el PW

Al presionar este en la pantalla LCD aparecen los TX conectados y debajo de ellos los presets, basta con seleccionarlos tocando la pantalla LCD

Al presionar puedo revisar las fotos y videos almacenadas del paciente

Al presionarlo aparece el listado de todos los pacientes que se encuentran en el disco duro

Ganancias en profundidad

Al presionarlo ecualiza de forma automática las ganancias en la imagen 2D y ajusta automáticamente la ganancia y escala del PW

Al girarlo modifica la profundidad

Al presionarlo congelo la imagen.

Al presionarlo me permite obtener una flecha

Con este llamo las medidas de acuerdo al preset que tenga activo

Almaceno imágenes estáticas

Fija medidas, textos, etc.

Al presionarlo puedo revisar las fotos y videos almacenadas del paciente

Al presionarlo aparece el listado de todos los pacientes que se encuentran en el disco duro

Ganancias en profundidad

Al presionarlo ecualiza de forma automática las ganancias en la imagen 2D y ajusta automáticamente la ganancia y escala del PW

Al girarlo modifica la profundidad

Al presionarlo congelo la imagen.

Al presionarlo me permite obtener una flecha

Con este llamo las medidas de acuerdo al preset que tenga activo

Almaceno imágenes estáticas

Fija medidas, textos, etc.